



Pflege- und Gebrauchsanweisung 01.2018
Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

Besondere Anwendungshinweise

- Die DryMed® -Inkontinenzprodukte müssen vor dem Tragen aus hygienischen Gründen gewaschen werden.
- Bitte klappen Sie die Klettverschlüsse bei den DryMed® -Windelhosen nach innen, damit die empfindliche, flauschige Innenseite der DryMed®-Inkontinenzprodukte nicht durch die Klettverschlussbänder beschädigt wird.
- Um eine vollständige Reinigung der DryMed®-Inkontinenzprodukte zu erreichen, empfiehlt es sich, die Produkte mit der verschmutzten Seite nach außen in die Waschmaschine zu legen.
- Bitte trocknen Sie DryMed®-Inkontinenzprodukte mit der Innenseite nach außen, so dass die Restfeuchtigkeit verdunsten kann. Es empfiehlt sich, auch die Produkte mit der Innenseite nach außen aufzubewahren.
- Der Polybeutel darf nicht in die Hände von den Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Anwendungsdauer

- Nach Verunreinigung durch Stuhl und/oder Urin sollten die DryMed®-Inkontinenzprodukte spätestens nach vier Stunden gewechselt werden. Es ist zu raten, die Produkte nach Gebrauch sofort auszutauschen.
- Auch ohne derartige Verunreinigungen sollten die DryMed®-Inkontinenzprodukte nach spätestens 24 Stunden gewechselt werden.

Hinweise zur Handhabung

- Die DryMed®-Inkontinenzprodukte wurden nach den gängigen Konfektionsgrößen angefertigt.
- Beim Anlegen der DryMed®-Windelhosen muss darauf geachtet werden, dass die Klettverschlüsse nicht an der Haut des Patienten reiben, da es sonst zu Hautrötungen und -reizungen kommen kann.
- Weiterhin ist zu beachten, dass an den Bein- und Hüftabschlüssen der körpernah getragenen DryMed®-Inkontinenzprodukte keine Falten gebildet werden, damit keine Druckstellen entstehen und ein Auslaufen der Flüssigkeit verhindert wird.

Geeignete Reinigungsverfahren

Die DryMed®-Inkontinenzprodukte können mit handelsüblichen, flüssigem Haushaltswaschmittel in der Haushaltswaschmaschine gewaschen werden. Bitte verwenden Sie keine Weichmacher, weil sonst die Saugkraft des Produktes reduziert wird.




Temperatur: Kochwäsche bis 95°C ist möglich. Eine Waschtemperatur von 60°C ist aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten aber ausreichend und empfehlenswert.



Bleichen: Bitte kein Chlor einsetzen; die wasserdichte PU-Beschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre Funktion, d. h. lässt Flüssigkeit durch.



Trockner: Die Temperatur im Wäschetrockner darf 90°C nicht übersteigen.

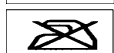

Bügeln: Bitte nicht bügeln, die empfindliche Oberfläche wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die DryMed®-Inkontinenzprodukte bis zu 300mal getragen und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

Hinweise zur Lagerung

- * Nicht über 90°C lagern.
- * Nicht mit offenem Feuer in Kontakt bringen.
- * Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) meiden.

Risiken

- * Bleiben die gebrauchten DryMed®-Inkontinenzprodukte länger mit dem Körper in Kontakt, können evtl. Hautreizungen, Rötungen oder ein Wundliegen auftreten.



Der Hersteller haftet nicht für Schäden/Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.