



WELLline® Milbenschutzbezüge

Pflege- und Gebrauchsanweisung 01.2018

WELLline® Anti-Milben-Bezüge für Hausstaubmilben-Allergiker

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen

Besondere Anwendungshinweise

- Bitte waschen Sie die Anti-Milben-Bezüge vor dem ersten Gebrauch.
- Die Anti-Milben- Bezüge werden als Zwischenbezug unter die normale Bettwäsche bezogen.
- Bitte beziehen Sie die Anti-Milben- Bezüge nach dem Waschen, erst wenn das Textil vollkommen trocken ist.
- Beim Beziehen muss die innenliegende Reißverschlussabdeckung so liegen, dass sie den Reißverschluss absichert.
- Es dürfen keine scharfen oder spitzen Gegenstände in Kontakt mit den Anti-Milben- Bezügen gebracht werden.
- Der Polybeutel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Erstickungsgefahr.

Anwendungsdauer

- Die Anti-Milben- Bezüge können nach Bedarf so oft wie nötig gewaschen werden. Bei starken allergischen Reaktionen empfiehlt es sich, die Anti-Milben- Bezüge bei Bedarf jedoch monatlich zu waschen.

Hinweise zur Handhabung

- Bei den Anti-Milben- Bezügen ist zu beachten, dass die Größe des Produkts entsprechend der Abmessungen des Betts zu wählen ist.
- Die Anti-Milben- Bezüge sollten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder mit geöffnetem Reißverschluss aufbewahrt werden.
- Die Anti-Milben- Bezüge dürfen nur mit **geöffnetem** Reißverschluss und linke Seite nach außen gewaschen werden.

Hinweise zur Lagerung

- Die Anti-Milben- Bezüge dürfen nicht mit offenem Feuer in Kontakt gebracht werden.
- Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) ist zu vermeiden.

Geeignete Reinigungsverfahren

Die Anti-Milben- Bettwäsche kann mit handelsüblichen Haushaltswaschmitteln in der Waschmaschine behandelt werden.



Temperatur: Eine Waschtemperatur von 60°C ist jedoch aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ausreichend und empfehlenswert.



Bleichen: Chlorbleiche nicht möglich



Trockner: niedrige Temperatur erlaubt



Bügeln: nicht möglich



Reinigen: chemisch Reinigen nicht möglich

Bei Beachtung dieser Hinweise können Sie die Anti-Milben- Bezüge länger benutzen, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

Risiken

Beim Überziehen der Anti-Milben- Bettwäsche über den Kopf droht Erstickungsgefahr!

Leistungsdaten

- hohes Partikel-Rückhaltevermögen, nachgewiesen durch Prüfbericht vom TÜV Rheinland
- Milben- und Milbenkotdicht (Milbenkot = Allergie erregend)
- atmungsaktiv
- hohe Waschbeständigkeit
- Qualitätsnachweis durch TÜV-Zertifikat
- Kostenerstattung durch Krankenkassen



Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.