

# Padycare<sup>®</sup> waschbare Inkontinenzhilfen


**Pflege- und Gebrauchsanweisung 04.09**  
Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

rezeptierfähig!

**Padycare<sup>®</sup> Inkontinenzprodukte**  
Genau Artikelbezeichnung siehe Polibeutel-Etikett



Schadstoffgeprüft nach  
Öko-Tex Standard 100

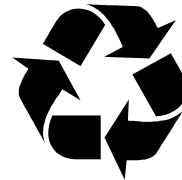

Recycelfähig

## Besondere Anwendungshinweise

- Die Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte müssen vor dem Tragen aus hygienischen und Gründen gewaschen werden.
- Bitte klappen Sie die Klettverschlüsse bei der Padycare<sup>®</sup>-Windelhose Modell "Hof" und der Padycare<sup>®</sup>-Vorlage Modell „Lindau“ nach innen, damit die empfindliche Innenseite der Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte nicht durch die Klettverschlusshacken beschädigt wird.
- Um eine vollständige Reinigung der Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte zu erreichen, empfiehlt es sich, die Produkte mit der verschmutzten Seite nach außen zu waschen.
- Bitte trocknen Sie Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte mit der Innenseite nach außen, so dass auch bleibende Restfeuchtigkeit ausgeschlossen werden kann. Es empfiehlt sich, auch die Produkte mit der Innenseite nach außen aufzubewahren.
- Polybeutel darf nicht in die Hände von den Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr.

## Anwendungsdauer

- Nach Verunreinigung durch Stuhl und / oder Urin sollten die Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte spätestens nach vier Stunden gewechselt werden. Es ist zu raten, die Produkte nach Gebrauch sofort zu wechseln.
- Auch ohne derartige Verunreinigungen sollten die Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte nach spätestens 24 Stunden gewechselt werden.

## Hinweise zur Handhabung

- Die Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte wurden nach den gängigen Konfektionsgrößen angefertigt.
- Beim Anlegen der Padycare<sup>®</sup>-Windelhose Modell „Hof“ und der Padycare<sup>®</sup>-Vorlage Modell „Lindau“ muss darauf geachtet werden, dass die Klettverschlüsse nicht an der Haut des Patienten reiben, da es sonst zu Hautrötungen und -reizungen kommen kann.
- Weiterhin ist zu beachten, dass an den Bein- und Hüftabschlüssen der körpernah getragenen Padycare<sup>®</sup>-Inkontinenzprodukte keine Falten gebildet werden, damit keine Druckstellen entstehen und ein Auslaufen der Flüssigkeit verhindert wird.
- Die Padycare<sup>®</sup>-Vorlagen Gr. 1 Modell „Füssen“, Gr. 2 Modell „Prien“ sollten mit Fixierhose Rügen mit Tasche und die Vorlage Gr. 3 Modell „Starnberg“ soll mit Fixierhose Borkum verwendet werden, um die Fixierung am Körper zu gewährleisten und ein Auslaufen der Flüssigkeit zu verhindern.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.**

# Padycare® waschbare Inkontinenzhilfen

## Geeignete Reinigungsverfahren

Die Padycare®-Inkontinenzprodukte können mit handelsüblichen Haushaltswaschmitteln in der Haushaltswaschmaschine behandelt werden. Bitte verwenden Sie keine Weichmacher, weil sonst die Saugkraft des Produktes reduziert wird.



**Temperatur:** Kochwäsche bis 95°C ist möglich, eine Waschtemperatur von 60°C ist aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten aber ausreichend und empfehlenswert.



**Bleichen:** Bitte *kein Chlor* einsetzen; die wasserdichte PU-Beschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre Funktion d. h. lässt Flüssigkeit durch.



**Trockner:** Die Temperatur im Wäschetrockner darf 90°C nicht übersteigen.



**Bügeln:** Bitte *nicht bügeln*, die empfindliche Oberfläche wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die Padycare®-Inkontinenzprodukte bis zu 300mal getragen und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

## Hinweise zur Lagerung

- Die Padycare®-Inkontinenzprodukte dürfen nicht bei Temperaturen über 90°C gelagert werden.
- Die Padycare®-Inkontinenzprodukte dürfen nicht mit offenem Feuer in Kontakt gebracht werden.
- Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) ist zu vermeiden.

## Risiken

- Bleiben die gebrauchten Padycare®-Inkontinenzprodukte länger mit dem Körper in Kontakt, können evtl. Hautreizungen, Rötungen und Wundliegen auftreten.

## Leistungsdaten

Padycare®-Inkontinenz-Produkte	Saugvolumen
Inkontinenz-Windelhose (alle Größen S - XXL) <b>Modell „Hof“</b>	mind. 1000 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.3 Inkontinenz-Vorlage (alle Größen S - XXL) <b>Modell „Starnberg“ und Modell „Lindau“</b>	mind. 600 g
Inkontinenz-Fixierhosen mit eingearbeiteter Vorlage (alle Größen S - XXL) <b>Modell „Sylt“ für Damen Modell „Rügen“ für Damen (mit Saugkern) Modell „Fehmarn“ für Herren</b>	mind. 500 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.1 <b>Modell „Füssen“</b>	mind. 150 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.2 <b>Modell „Prien“</b>	mind. 150 g
Krankenunterlage <b>Padycare Plus 75 x 85 cm</b>	mind. 370 g
Krankenunterlage <b>Padycare Plus mit Steckklaken 75 x 85 cm</b>	mind. 370 g

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.**