

Padycare[®] waschbare Inkontinenzhilfen

Pflege- und Gebrauchsanweisung 10.08

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!


rezeptierfähig!

Padycare[®] Inkontinenzprodukte

Genau Artikelbezeichnung siehe Polibeutel-Etikett



Schadstoffgeprüft nach
Öko-Tex Standard 100

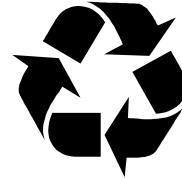

Recycelfähig

Besondere Anwendungshinweise

- Die Padycare[®]-Inkontinenzprodukte müssen vor dem Tragen aus hygienischen und Gründen gewaschen werden.
- Bitte klappen Sie die Klettverschlüsse bei der Padycare[®]-Windelhose Modell "Hof" und der Padycare[®]-Vorlage Modell „Lindau“ nach innen, damit die empfindliche Innenseite der Padycare[®]-Inkontinenzprodukte nicht durch die Klettverschluss hacken beschädigt wird.
- Um eine vollständige Reinigung der Padycare[®]-Inkontinenzprodukte zu erreichen, empfiehlt es sich, die Produkte mit der verschmutzten Seite nach außen zu waschen.
- Bitte trocknen Sie Padycare[®]-Inkontinenzprodukte mit der Innenseite nach außen, so dass auch bleibende Restfeuchtigkeit ausgeschlossen werden kann. Es empfiehlt sich, auch die Produkte mit der Innenseite nach außen aufzubewahren.
- Polybeutel darf nicht in die Hände von den Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Anwendungsdauer

- Nach Verunreinigung durch Stuhl und / oder Urin sollten die Padycare[®]-Inkontinenzprodukte spätestens nach vier Stunden gewechselt werden. Es ist zu raten, die Produkte nach Gebrauch sofort zu wechseln.
- Auch ohne derartige Verunreinigungen sollten die Padycare[®]-Inkontinenzprodukte nach spätestens 24 Stunden gewechselt werden.

Hinweise zur Handhabung

- Die Padycare[®]-Inkontinenzprodukte wurden nach den gängigen Konfektionsgrößen angefertigt.
- Beim Anlegen der Padycare[®]-Windelhose Modell „Hof“ und der Padycare[®]-Vorlage Modell „Lindau“ muss darauf geachtet werden, dass die Klettverschlüsse nicht an der Haut des Patienten reiben, da es sonst zu Hautrötungen und -reizungen kommen kann.
- Weiterhin ist zu beachten, dass an den Bein- und Hüftabschlüssen der körpernah getragenen Padycare[®]-Inkontinenzprodukte keine Falten gebildet werden, damit keine Druckstellen entstehen und ein Auslaufen der Flüssigkeit verhindert wird.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Padycare® waschbare Inkontinenzhilfen

- Die Padycare®-Vorlagen Gr. 1 Modell „Füssen“, Gr. 2 Modell „Prien“ sollten mit Fixierhose Rügen mit Tasche und die Vorlage Gr. 3 Modell „Starnberg“ soll mit Fixierhose Borkum verwendet werden, um die Fixierung am Körper zu gewährleisten und ein Auslaufen der Flüssigkeit zu verhindern.

Geeignete Reinigungsverfahren

Die Padycare®-Inkontinenzprodukte können mit handelsüblichen Haushaltswaschmitteln in der Haushaltswaschmaschine behandelt werden. Bitte verwenden Sie keine Weichmacher, weil sonst die Saugkraft des Produktes reduziert wird.




Temperatur: Kochwäsche bis 95°C ist möglich, eine Waschtemperatur von 60°C ist aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten aber ausreichend und empfehlenswert.



Bleichen: Bitte kein Chlor einsetzen; die wasserdichte PU-Beschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre Funktion d. h. lässt Flüssigkeit durch.



Trockner: Die Temperatur im Wäschetrockner darf 90°C nicht übersteigen.

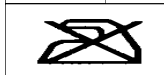

Bügeln: Bitte nicht bügeln, die empfindliche Oberfläche wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die Padycare®-Inkontinenzprodukte bis zu 300mal getragen und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

Hinweise zur Lagerung

- Die Padycare®-Inkontinenzprodukte dürfen nicht bei Temperaturen über 90°C gelagert werden.
- Die Padycare®-Inkontinenzprodukte dürfen nicht mit offenem Feuer in Kontakt gebracht werden.
- Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) ist zu vermeiden.

Risiken

- BLEIBEN die gebrauchten Padycare®-Inkontinenzprodukte länger mit dem Körper in Kontakt, können evtl. Hautreizungen, Rötungen und Wundliegen auftreten.

Leistungsdaten

Padycare®-Inkontinenz-Produkte	Saugvolumen
Inkontinenz-Windelhose Modell „Hof“ (alle Größen S - XXL)	mind. 1000 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.3 Inkontinenz-Vorlage Modell „Starnberg“ und (alle Größen S - XXL) Modell „Lindau“	mind. 600 g
Inkontinenz-Fixierhosen mit eingearbeiteter Vorlage (alle Größen S - XXL) Modell „Sylt“ für Damen Modell „Rügen“ für Damen (mit Saugkern) Modell „Fehmarn“ für Herren	mind. 500 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.1 Modell „Füssen“	mind. 150 g
Inkontinenz-Vorlage Gr.2 Modell „Prien“	mind. 150 g
Krankenunterlage Padycare Plus 75 x 85 cm	mind. 370 g
Krankenunterlage Padycare Plus mit Stecklaken 75 x 85 cm	mind. 370 g

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.