

# Padycare<sup>®</sup> Neurodermitis

versilberte Spezialtextilien und Bettwäsche mit antibakteriellen Effekt

Stand 11.2009

**klinisch getestet**

**Pflege- und Gebrauchsanweisung  
Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!**



**Padycare<sup>®</sup> Spezialtextilien zu Linderung der Symptome von Neurodermitis, Schuppen-Flechten und Pilz-Erkrankungen**

**Für Babys, Kinder und Erwachsene**

**ACHTUNG :** Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen sind k e i n e Herstellungsfehler und stellen keine Qualitätsmängel dar. Dies geschieht durch die Oxidation der Silber mit Körperwärme und Körperfeuchtigkeit. Diese Oxidation verhindert die Funktion von Silber nicht.

## Besondere Anwendungshinweise

- Bitte waschen Sie die **Padycare<sup>®</sup>** Spezialtextilien vor dem ersten Tragen.
- Bitte tragen Sie die Spezialtextilien lang und eng auf der Haut, um die Wirkung und das Heilungsprozess zu optimieren. Die Silberionen werden durch Körperwärme und Feuchtigkeit schneller auf die Haut transportiert.
- Es ist wichtig, die Haut mit Ihren Pflege-Cremes einzureiben, da die Feuchtigkeit hilft, die Haut nicht auszutrocknen.
- Bitte beachten Sie, dass es sich um äußerst hochwertige und hochelastische medizinische Spezialtextilien handelt, die aufgrund hoher Beanspruchung (z.B. häufiges An- und Ausziehen, Waschen) einen sorgfältigen Umgang u.a. in Bezug auf die Nähte erfordern.
- Sie können die Nähte der **Padycare<sup>®</sup>** Spezialtextilien nach innen oder außen tragen – wie es Ihnen angenehmer ist. Wir empfehlen jedoch die Nähte nach außen zu tragen um Reibungen auf der Haut zu vermeiden.
- Das Anprobieren der Silbertextilien im eingecremten Zustand ist nicht zulässig.
- Getragene Ware kann nicht zurück genommen werden.
- Bitte halten Sie Polybeutel von den Kindern wegen Erstickungsgefahr fern.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Tex- A-Med<sup>®</sup> GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D- 85737 Ismaning  
Tel.:+49-89-9233 469 0; Fax:+49-89-9233 469 23; E-mail: [info@texamed.de](mailto:info@texamed.de); [www.texamed.de](http://www.texamed.de)

# Padycare<sup>®</sup> Neurodermitis


versilberte Spezialtextilien und Bettwäsche mit antibakteriellen Effekt

## Geeignete Reinigungsverfahren

Die versilberten **Padycare<sup>®</sup>** Spezialtextilien können wie Seide behandelt werden. Waschen Sie mit handelsüblichem **Feinwaschmittel** in der Haushaltswaschmaschine und an der Luft trocknen lassen. Zur richtigen Pflege empfehlen wir Ihnen **Padywash<sup>®</sup>** flüssiges Waschmittel.

- Bitte verwenden Sie bei **Padycare<sup>®</sup>** versilberten Spezialtextilien keine herkömmlichen Voll-Waschmittel oder Weichspüler. Wir empfehlen flüssiges mildes Waschmittel.
- Bitte waschen Sie Ihre **Padycare<sup>®</sup>** Spezialtextilien beim Schonwaschgang separat oder mit anderen synthetischen Fasern.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die versilberten **Padycare<sup>®</sup>** Spezialtextilien mehr als 150 mal benutzt und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

	<b>Temperatur:</b> Schonwaschgang bei 30°C. <u>Keine Desinfektionsmittel, chlorhaltige Reiniger und Weichspüler verwenden.</u>
	Bitte <b><u>kein Chlor</u></b> einsetzen;
	<b>Trockner:</b> Lufttrocknen. Bitte nicht im Wäschetrockner behandeln, da die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien im direkten Kontakt mit Hitze zerstört werden kann.
	<b>Bügeln:</b> Sie können nur lauwarm bügeln, die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört. Nur im <u>trockenen Zustand</u> bügeln, da sonst Verfärbungen auftreten. Nicht mit Dampf bügeln.
	Keine chemische Reinigung

## **Achtung: Silberallergie kann zu Hautunverträglichkeit führen!**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Tex- A-Med<sup>®</sup> GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D- 85737 Ismaning  
Tel.:+49-89-9233 469 0; Fax:+49-89-9233 469 23; E-mail: [info@texamed.de](mailto:info@texamed.de); [www.texamed.de](http://www.texamed.de)