

Padycare[®] Neurodermitis

versilberte Spezialtextilien und Bettwäsche

Stand 01.2009

klinisch getestet

Pflege- und Gebrauchsanweisung
Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!



Recyclefähig



Padycare[®] Spezialtextilien zu Linderung der Symptome von Neurodermitis, Schuppenflechten und Pilz-Erkrankungen

Für Babys, Kinder und Erwachsene

ACHTUNG : Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen sind k e i n e Herstellungsfehler und stellen keine Qualitätsmängel dar. Dies geschieht durch die Oxidation der Silber mit Körperwärme und Körperfeuchtigkeit. Diese Oxidation verhindert die Funktion von Silber nicht.

Besondere Anwendungshinweise

- Bitte waschen Sie die Padycare[®] Spezialtextilien vor dem ersten Tragen.
- Bitte tragen Sie die Spezialtextilien lang und eng auf der Haut, um die Wirkung und das Heilungsprozess zu optimieren. Die Silberionen werden durch Körperwärme und Feuchtigkeit schneller auf die Haut transportiert.
- Es ist wichtig, die Haut mit Ihren Pflege-Cremes einzureiben, da die Feuchtigkeit hilft, die Haut nicht auszutrocknen.
- Bitte beachten Sie, dass es sich um äußerst hochwertige und hochelastische medizinische Spezialtextilien handelt, die aufgrund hoher Beanspruchung (z.B. häufiges An- und Ausziehen, Waschen) einen sorgfältigen Umgang u.a. in bezug auf die Nähte erfordern.
- Sie können die Nähte der Padycare[®] Spezialtextilien nach innen oder außen tragen – wie es Ihnen angenehmer ist. Wir empfehlen jedoch die Nähte nach außen zu tragen um Reibungen auf der Haut zu vermeiden.
- Das Anprobieren der Silbertextilien im eingecremten Zustand ist nicht zulässig.
- Getragene Ware kann nicht zurück genommen werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Tex- A-Med[®] GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning Tel.: (+49)-89-9233 469-0; Fax: (+49)-89 9233 469-23

Padycare[®] Neurodermitis






versilberte Spezialtextilien und Bettwäsche

Geeignete Reinigungsverfahren

Die versilberten Padycare[®] Spezialtextilien können wie Seide behandelt werden. Waschen Sie mit handelsüblichem **Feinwaschmittel** in der Haushaltswaschmaschine. Zur richtigen Pflege empfehlen wir Ihnen Padywash[®] Waschkugeln. Bitte an der Luft trocknen lassen.

- Bitte verwenden Sie bei Padycare[®] versilberten Spezialtextilien keine herkömmlichen Voll-Waschmittel oder Weichspüler.
- Bitte waschen Sie Ihre Padycare[®] Spezialtextilien beim Schonwaschgang separat oder mit anderen synthetischen Fasern.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die versilberten Padycare[®] Spezialtextilien mehr als 150 mal benutzt und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

	Temperatur: Schonwaschgang bei 30°C. <u>Keine Desinfektionsmitte, chlorhaltige Reiniger und Weichspüler verwenden.</u>
	Bitte <u>kein Chlor</u> einsetzen;
	Trockner: Lufttrocknen. Bitte nicht im Wäschetrockner behandeln, da die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien im direkten Kontakt mit Hitze zerstört werden kann.
	Bügeln: Sie können nur lauwarm bügeln, die empfindliche Oberfläche der Spezialtextilien wird durch direkten Kontakt mit der Hitze zerstört. Nur im <u>trockenen Zustand</u> bügeln, da sonst Verfärbungen auftreten. Nicht mit Dampf bügeln.
	Keine chemische Reinigung

Achtung: Silberallergie kann zu Hautunverträglichkeit führen!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Tex- A-Med[®] GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning Tel.: (+49)-89-9233 469-0; Fax: (+49)-89 9233 469-23