

# Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie Bettwäsche

**für Hausstaubmilben-Allergiker**

**Pflege- und Gebrauchsanweisung 04.2009**

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen



**Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie Bettwäsche**

## Besondere Anwendungshinweise

- Bitte waschen Sie die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings vor dem ersten Gebrauch.
- Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings werden als Zwischenbezug unter die normale Bettwäsche bezogen.
- Nach dem Waschen dürfen die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings erst bezogen werden, wenn der Stoff vollkommen trocken ist.
- Weiterhin ist darauf zu achten, dass Kissen, Bettdecke und Matratze trocken sind, bevor die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings übergezogen werden.
- Beim Beziehen muss die innenliegende Reißverschlussabdeckung so liegen, dass sie den Reißverschluss absichert.
- Es dürfen keine scharfen, spitzen Gegenstände in Kontakt mit den Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings gebracht werden.
- Polybeutel darf nicht in die Hände von den Kindern gelangen. Erstickungsgefahr.

## Anwendungsdauer

- Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings können nach Bedarf so oft wie nötig gewaschen werden. Bei starken allergischen Reaktionen empfiehlt es sich, die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings alle drei Monate zu waschen.

## Hinweise zur Handhabung

- Bei den Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings ist zu beachten, dass die Größe des Produkts entsprechend den Abmessungen der Bettwäsche / Matratze gewählt wurde.
- Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings sollten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder mit geöffnetem Reißverschluss aufbewahrt werden.
- Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings dürfen nur mit **geöffnetem** Reißverschluss gewaschen werden.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.**

Tex- A-Med<sup>®</sup> GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning, Tel.: +49-89-9233469-0;

Fax:+49-89-9233469-23 ;


E-mail: [info@texamed.de](mailto:info@texamed.de) ; [www.texamed.de](http://www.texamed.de)

# Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie Bettwäsche

## für Hausstaubmilben-Allergiker

### Geeignete Reinigungsverfahren

Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings können mit handelsüblichen Haushaltswaschmitteln in der Haushaltswaschmaschine behandelt werden.

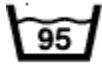

**Temperatur:** Eine Waschtemperatur von 60°C ist jedoch aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ausreichend und empfehlenswert.



**Bleichen:** Chlorbleiche möglich



**Trockner:** tumblerbeständig



**Bügeln:** bügelbar

Bei Beachtung dieser Hinweise können Sie die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings länger benützt werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.

### Hinweise zur Lagerung

- Die Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings dürfen nicht mit offenem Feuer in Kontakt gebracht werden.
- Der direkte Kontakt mit sonstigen Wärmequellen (Heizplatten etc.) ist zu vermeiden.

### Risiken

- Beim Überziehen der Padycare<sup>®</sup> Anti-Allergie-Encasings über den Kopf droht Erstickungsgefahr!

### Leistungsdaten

- sehr hohe Partikeldichtigkeit, milbendicht
- atmungsaktiv
- schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100, Klasse I
- hohe Waschbeständigkeit
- sehr gute Feuchtetransport
- Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100



**Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.**

Tex- A-Med<sup>®</sup> GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning, Tel.: +49-89-9233469-0;  
Fax: +49-89-9233469-23 ;  
E-mail: [info@texamed.de](mailto:info@texamed.de) ; [www.texamed.de](http://www.texamed.de)