

**klinisch getestet**

**Gebrauchsinformation Stand 01.2018**

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!



**PADY-CARE® antibakterielle Verbandmittel zur Therapie von oberflächenbeschädigte Haut, bakteriellen, entzündlichen Hauterkrankungen, wie z.B. Atopisches Ekzem (Neurodermitis), Schuppenflechte, Pilzkrankungen, Hautirritationen oder Verbrennungen.**

ACHTUNG: Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen sind keine Herstellungsfehler und stellen keine Qualitätsmängel dar. Dies geschieht durch die Oxidation des Silbers mit der Körperwärme und Körperfeuchtigkeit. Die Oxidation verhindert die Funktion der Verbandmittel aus Silbertextilien nicht.

**Besondere Anwendungshinweise**

- Bitte waschen Sie die PADY-CARE® Verbandmittel vor dem ersten Tragen.
- Bitte tragen Sie die antibakteriellen Verbandmittel eng auf der Haut, um die Wirkung und den Heilungsprozess zu optimieren. Die Silberionen werden durch Körperwärme und Feuchtigkeit schneller auf die Haut transportiert.
- Es ist wichtig, die Haut mit Ihren Pflege-Cremes einzureiben, da die Feuchtigkeit hilft, der Hautaustrocknung entgegen zu wirken. Die Feuchtigkeit der Creme beschleunigt den Transport der Silberionen auf die Haut.
- Bitte beachten Sie, dass es sich um äußerst hochwertige und hochelastische medizinische Verbandmittel mit 99,6% Silberreinheit handelt, die aufgrund hoher Beanspruchung (z.B. häufiges An- und Ausziehen, Waschen) einen sorgfältigen Umgang u.a. in Bezug auf die Nähte erfordern.
- Die Nähte der PADY-CARE® Verbandmittel wurden bei Babys und Kindern bewusst nach außen gelegt, um die Haut vor Reibung zu schützen. Auf Wunsch kann man die Nähte auch nach innen tragen.
- Das Anprobieren der Silbertextilien im eingecremten Zustand ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig.
- Getragene Ware kann nicht zurück genommen werden.
- Bitte halten Sie den Verpackungsmaterial / Polybeutel von Kindern wegen Erstickungsgefahr fern.
- Bei Allergien gegen Silber, die Produkte nicht tragen.

**Geeignete Reinigungsverfahren**

Die versilberten PADY-CARE® Verbandmittel können wie Seide behandelt werden. Waschen Sie sie mit flüssigem Feinwaschmittel in der Haushaltswaschmaschine oder per Hand. Lassen Sie die Silbertextilien an der Luft trocknen.

Zur richtigen Pflege empfehlen wir Ihnen unser PADY-WASH® Flüssig- Waschmittel.

- Bitte verwenden Sie für die PADY-CARE® Verbandmittel keinen Weichspüler. Wir empfehlen flüssiges, mildes Feinwaschmittel.
- Bitte waschen Sie Ihre PADY-CARE® Verbandmittel im Schonwaschgang separat oder mit anderen synthetischen Fasern.

Bei Beachtung dieser Hinweise können die versilberten PADY-CARE® Verbandmittel mehr als 200 mal benutzt und gewaschen werden, ohne dass sich die angegebenen Eigenschaften ändern.



Temperatur: Schonwaschgang bei 30°C.



Bitte kein Chlor, keine Desinfektionsmittel, chlorhaltige Reiniger und Weichspüler verwenden.



Bitte Lufttrocknen. Bitte nicht im Wäschetrockner behandeln, da die empfindliche Silberoberfläche der Spezialtextilien im direkten Kontakt mit Hitze oder Sonnenlicht oxidiert.



Nicht bügeln. Bei direkter Hitze oder Sonnenlicht oxidiert das Silber auf die Oberfläche.



Keine chemische Reinigung.

**Achtung: Silberallergie kann zu Hautunverträglichkeit führen!**

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind.**